



	time	max. time
650 W	3 min.	3,5 min.
750 W	2,5 min.	3 min.
850 W	2 min.	2,5 min.
1000 W	1,5 min.	2 min.

DANSK

BRUGSANVISNING

- Tag geléposerne ud af beholderne i Migraine Gel Hat InnovaGoods® for at varme dem op eller at køle dem ned, og placér dem igen i coveret, inden du bruger huen.
- Kælende effekt: Placer geléposterne i fryseren i 90 minutter.
- Varmende effekt: Placer geléposerne i mikrobølgeovnen i 30 sekunder ved 600° C. Hvis du gerne vil have, at de er varmere, skal du fortsætte med at varme dem op i intervaller af 15 sekunder. Før du placerer Migraine Gel Hat InnovaGoods® på dit hoved, skal du teste, om den har den ønskede temperatur.
- Brug snoren til at justere Migraine Gel Hat InnovaGoods®.
- Du kan vaske coveret i hånden med lunken vand og neutral sæbe. Vent, til den er helt tør, før du bruger den.

BEMÆRKNINGER

Brug ikke Migraine Gel Hat InnovaGoods® i mere end 20 minutter ad gangen. Sov ikke med hatten på, og tjek hyppigt din kropstemperatur. Hvis du bemærker overdreven eller langvarig rødme, stop behandlingen, indtil huden genvinder sit normale udseende. Rengør det med en let fugtig klud. Vask den ikke i vaskemaskine og brug ikke produkter eller materialer, der ridser, til at rense den. Brug ikke enheden på steder, hvor huden er inficeret eller øm. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn.